

採便方法 / ご提出について

① 採便容器

腸内細菌検査 採便容器



ノロウイルス検査 採便容器




黒い小袋の中に糞便採取容器が入った状態でお届けします。
名簿を頂いた場合は部署・氏名を印字してあります。

※便採取容器と黒い小袋のラベルに印字された番号(○印)が異なるようにお願いします。
(当社では品質・精度管理上、番号で受検者区別を行ってます。)


② 採便方法

腸内細菌検査 採便方法

腸内細菌検査の糞便採取容器には保存培地が入っています。

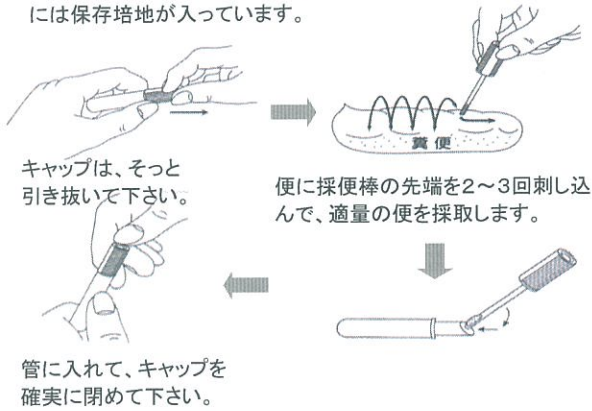

ノロウイルス検査 採便方法

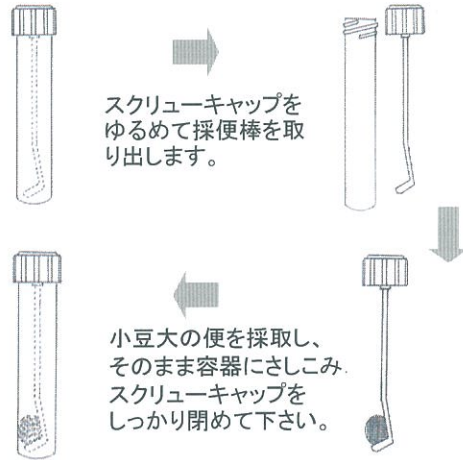

※採便後は約1週間、常温で保管できます

③ 検査申込書

※ 検査申込書へは、必ずご提出人数をご記入の上、容器と一緒にご提出お願いします。

腸内細菌検査申込書

セット	<検査申込書> <small>ご記入の上検査容器と一緒に提出下さい。</small>		
お客様名			
住所			
TEL	ご提出人数	名	
備考			
回収日・発送日 月 日()	株式会社日本環境衛生研究所 仙台市宮城野区日の出町3丁目7-14 TEL 022-782-1024 FAX 022-782-1027		

ノロウイルス検査申込書

ノロウイルス	<検査申込書> <small>ご記入の上検査容器と一緒に提出下さい。</small>		
お客様名			
住所			
TEL	ご提出人数	名	
備考			
回収日・発送日 月 日()	株式会社日本環境衛生研究所 仙台市宮城野区日の出町3丁目7-14 TEL 022-782-1024 FAX 022-782-1027		

④ 検体提出

常温で郵送、宅急便他で送付下さい。

検体送付先: **株式会社日本環境衛生研究所**
〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町3丁目7-14
TEL 022-782-1024 FAX 022-782-1027